

Instructions For Use

X-SPURT TEST PADDLE


for CMT/RMT Mastitis Test



- 1 Squeeze a small amount of milk from each teat into the corresponding cup of the paddle.

Melken Sie ein wenig Milch aus jedem Euterviertel in das entsprechende Testfeld des X-Spurt Behälters.

Mettre une petite quantité de lait dans chaque bol.

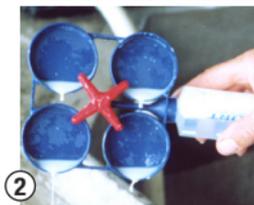

- 2 Tip out the four samples to the level indicated in the paddle cups.

Gießen Sie die überschüssige Milch weg, so dass nur soviel Milch in den Testfeldern bleibt, wie durch die Markierungen angezeigt wird.


Evacuer le surplus jusqu'à atteindre le niveau indiqué sur les bols.



- 3 Squeeze the X-Spurt handle to add reagent in about equal quantity to the milk samples. Swirl paddle to identify coagulation indicating an affected quarter.

Drücken Sie auf den X-Spurt Griff, um den Milchproben eine jeweils gleiche Menge an Testflüssigkeit zuzuführen. Bewegen Sie nun den Testbehälter hin und her, um ein befallenes Euterviertel durch Milchgerinnung erkennen zu können.

Ajouter le réactif en quantité égale, imprimer un mouvement de rotation pour identifier l'indication de numération.

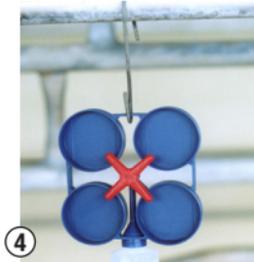

- 4 Tip out samples between cows. Rinse and clean after milking. Hang in a convenient place.

Bevor Sie bei der nächsten Kuh weiter testen, gießen Sie die Milchproben weg. Zur Reinigung spülen Sie den Testbehälter nach dem Melken aus. Hängen Sie ihn an eine geeignete Stelle.

Déverser les échantillons entre chaque vache. Rincer et nettoyer l'appareil. Le ranger dans un endroit pratique.